

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ
ORTOPÉD CIPŐHÖZ
Rendelésre készült eszköz



LA-BELLY 2001 KFT
4026 DEBRECEN, EGYMALOM U. 3.
TEL: 52/453-658

Kiszolgált eszköz:

.....
.....

Név:.....Sorszám.: R2021/.....

Cím:

Felíró orvos: Felírás dát.: 2021.....

Intézmény: Átadás dát.: 2021.....

Tisztelt Vásárlónk!

Kérjük figyelmesen olvassa el a vevőtájékoztatót és őrizze meg, szükség esetén ezzel keresse fel a megrendelés felvevő üzletünket.

Az Ön cipője gyógycipő. A lábbeli egyedi méretre, kizárólag az Ön használatára készült a szakorvos előírásainak megfelelő a járás megkönnyítése, a láb kiemelése, ill. kezelése érdekében.

Rendeltetése: Ortopéd cipő, utcai használatra.

A lábbeli főbb anyagai:

Felsőbőr:	<input checked="" type="checkbox"/> természetes bőr	<input type="checkbox"/> csiszolt bőr
Bélés:	<input type="checkbox"/> természetes bőr	<input type="checkbox"/> textil <input type="checkbox"/> báránybőr
Járótalp:	<input type="checkbox"/> természetes bőr	<input checked="" type="checkbox"/> könnyűszerkezetű habosított műanyag.

Megfelelőségi tanúsítás:

Termékünk, melyre a nyilatkozat vonatkozik, teljes mértékben kielégíti az orvostechikai eszközről szóló 4/2009.(III.17) EÜM rendelet 1-es számú mellékletében (osztályba sorolt eszközök) vonatkoztatható alapvető követelmények mindegyikét és megfelel a 2017/745 EU MDR rendelet I. mellékletében található általános biztonságossági és teljesítőképességi követelményeinek.

Az Önnek átadott lábbeli megfelel a vonatkozó általános műszaki és higiéniai követelményeknek az anyagösszetétel és az összeszerelés előírásai szerint. A lábbelivel kapcsolatban kifogást csak tartóssági hiányosságra fogadunk el. Meghibásodás esetén a hiba kijavítását, a cipőt átadó üzletünkben kell kérni. Kérjük, hogy a tájékoztatót hozza magával.

A cipő javítása:

A gyógycipő javítását a Társadalombiztosítás nem támogatja.

A cipő javítását a jótállás és szavatosság határidején belül áll módunkban javítani, ha a termék rendeltetésszerűen volt használva. A termékre 24 hónap szavatosság vonatkozik, 100 000 Ft alatti termékre 12 hónap jótállás, 100 000 Ft feletti termékre pedig 24 hó jótállás vonatkozik.

A lábbeli ápolása:

A természetes (valódi) bőr sajátossága az, hogy előnyös esztétikai tulajdonságait, „megjelenését” és tartósságát csak megfelelő ápolás mellett tudja megtartani.

Ezért célszerű a következő ápolási javaslatot betartani:

- A lábbelit minden viselés után tisztítsuk meg a szennyeződéstől. Ezt a lábbeli felsőrészének nedves ruhával való áttörölésével érjük el. A talpat és a sarkat erős szőrkefével keféljük át, szükség esetén nedves tisztítószermentes ruhával mossuk le.
- A száraz, szennyeződésmentes felsőbőrre a cipőápoló krémet vékony rétegben vigyük fel. A cipőápoló lehet hagyományos, vagy speciális műgyanta krém.
- A cipőápoló beszívódása után a felsőbőrt puha ruhával töröljük át (polírozzuk) és a lábbeli visszacapja eredeti színét és fényét.
- Csiszolt felsőbőrök esetén (pl.: nubuk, velúr) a szennyeződéseket kemény szőrű kefével távolítsuk el és az anyag színével megegyező színű spray-vel vékonyan fújjuk le.
- Célszerű a fenti ápolás után a lábbelit (sámfával, vagy másképpen) kitömni, mivel így formáját is tovább megőrzi.
- A cipőt hűvös, szellős helyen tároljuk.

A cipő viseléséhez kényelmes és stabil járást, valamint jó egészséget kívánunk!!!

Kérjük, hogy jelen tájékoztatót a

Kihordási idő: emelt jogcím esetén 6 hó, egyébként 12 hó.

12/24 hónap jótállási idő

24 hónap szavatossági idő

lejártáig megőrizni szíveskedjék!!!

LA-BELLY 2001 KFT, 4026 DEBRECEN, EGYMALOM U. 3.